

SCHEDA TECNICA

COPERTA ANTIUSTIONE



Caratteristiche generali

Le coperte in idrogel per la sopravvivenza in traumi da fuoco BURNFREE sono progettate per le emergenze e per un utilizzo industriale in casi di primo soccorso per ustioni e costituiscono anche una valida protezione fisica da calore, fuoco e fumo. Le coperte sono fatte in pura lana vergine, tessute con un'unica costruzione a celle interposta. La speciale ostruzione, assieme alle fibre di lana, permette alla coperta di sostenere fino a 14 volte il suo peso di soluzione BURNFREE. Le coperte per traumi da fuoco BURNFREE costituiscono una valida protezione fisica dal fuoco. Quando vengono messe sopra la testa e il corpo, le coperte ignifughe BURNFREE formano uno strado protettivo per un soccorritore o per una persona intrappolata dal fuoco. Le coperte possono anche essere buttate su un'area in fiamme per estinguere il fuoco e creare una via di fuga. Per un trattamento immediato di primo soccorso, le coperte possono essere avvolte attorno a una persona i cui vestiti stanno bruciando o che abbia subito un'ustione. Le coperte BURNFREE spegneranno all'istante il fuoco mentre allo stesso tempo inumidiscono e raffreddano il carburante che è solitamente rappresentato dal vestiario. Questo utilizzo delle coperte BURNFREE riduce i traumi fisiologici e psicologici provvedendo il raffreddamento e l'umidificazione dell'ustione. Le coperte BURNFREE possono essere utilizzate per ridurre il dolore e il trauma di ustioni da fuoco e fiamme, di scottature, di ustioni chimiche ed elettriche. Comunque, in caso di ustioni chimiche, la zona interessata deve essere innanzitutto sciacquata per eliminare l'agente chimico responsabile. In caso di ustioni elettriche assicurarsi che non vi sia corrente poiché la soluzione del gel è a base di acqua e quindi conduce l'elettricità. Le coperte BURNFREE possono essere utilizzate per estinguere il fuoco, inclusi incendi di pentole o grassi che si possono scatenare in cucina. Prima di utilizzare le coperte a questo scopo, staccare l'elettricità e chiudere il gas. Posizionare la coperta sopra il fuoco mantenendola lontana dal corpo. Dopo un'attesa di diversi minuti la coperta può essere rimossa. Il sistema di coperte in idrogel per la sopravvivenza ai traumi da fuoco BURNFREE è imballato in una borsa robusta e flessibile con una chiusura a doppia zip. La flessibilità della borsa permette un trasporto confortevole. Possiede anche una tracolla regolabile che può essere allungata per portare la borsa a tracolla o attorno al corpo tenendo le mani libere.

Caratteristiche tecniche

Materiale: Le coperte hanno una base in pura lana vergine con un tessuto intermedio a celle impregnato del gel burn free.

dimensione :

Art.600034 cm91x76

Art.600069 cm183x152

Art.600070 cm244x152

Pharma[+] aid Pharma[+] med Pharma[+] sport Pharma[+] nautic

PHARMAPIU' SRL c/o Centro IBISCO

Edificio B moduli 14/15 – Str. Provinciale Lungofino, 187 - 65013 Città Sant'Angelo (PE)

Tel **39 085 9508120 / Fax **39 085 9508930 - sito internet: www.pharmapiu.com - e-mail: info@pharmapiu.com

P.I. IT01351390685