



CARATTERISTICHE GENERALI

Il cerotto idrocolloidale è ideale per vesciche già formate. La massa assorbe le secrezioni delle vesciche e permette una naturale cicatrizzazione.

Modo d'uso: dopo un pediluvio in acqua tiepida, asciugare con cura ed applicare il cerotto, centrando l'idrocolloide sulla vescica. La medicazione si stacca da sola.

Non applicare su pelle infiammata e su piccoli tagli e screpolature o sulla pelle non interessata dalla vescica. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Uso esterno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

400111/M Cerotti vesciche per tallone: 5 pz Dim. 68x43 mm

400111/P Cerotti vesciche per dita: 6 pz Dim. 20x45 mm

Rev.2022